


車いす座面のたわみ《解消+延長》
板の作り方マニュアル(設計図)
By安藤祐介

横45cm

座面を延長したい長さにより変更
45cm以上に伸ばすなら強度を出すため厚さ1cmにする

縦30cm
車いす座幅-10cmが目安
座幅より小さくしてたわみはめこみ安定させる

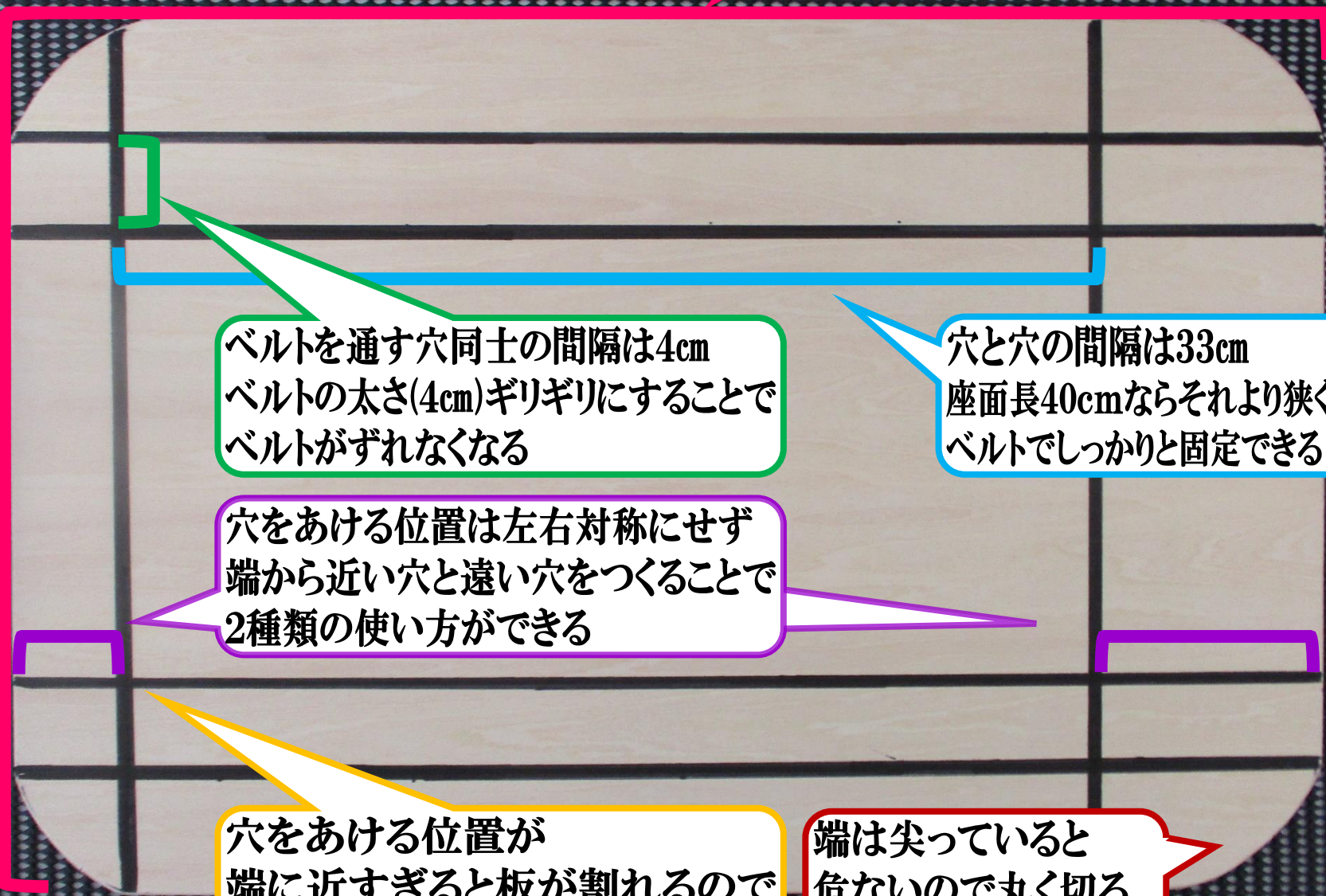

ベルトを通す穴同士の間隔は4cm
ベルトの太さ(4cm)ギリギリにすることで
ベルトがずれなくなる

穴と穴の間隔は33cm
座面長40cmならそれより狭くすることで
ベルトでしっかりと固定できる

穴をあける位置は左右対称にせず
端から近い穴と遠い穴をつくることで
2種類の使い方ができる

穴をあける位置が
端に近すぎると板が割れるので
最低でも3cmは離しておく

端は尖っていると
危ないので丸く切る
できればやすりがけも